



Sauganlage dekontaminieren



1 Die beiden Kappen der Saugschlauchansätze abnehmen

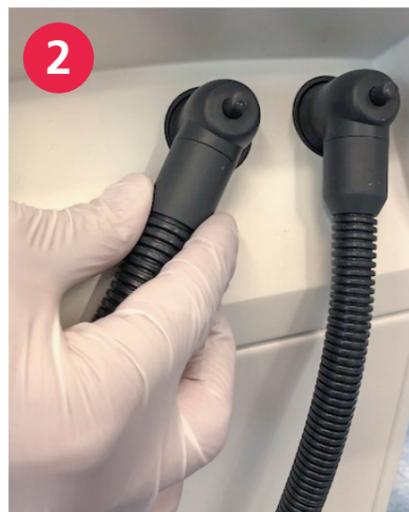


2 Saugschläuche von der Einheit lösen

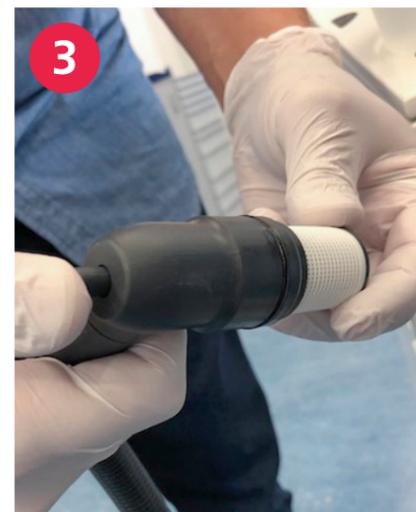

3 Knopf drücken, um den Filter auszuwerfen



4 Abdeckung des Speibeckens entfernen

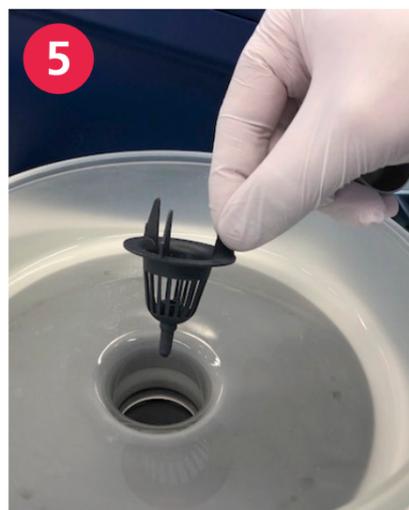

5 Filter des Speibeckens entfernen



6 Zur Dekontaminierung die Saugschlauchansätze, die Saugschlauch- und Speibeckenfilter ins Dekontaminationsbad legen

zmk bern

Zahnmedizinische Kliniken
der Universität Bern


u^b

b
UNIVERSITÄT
BERN

Korrektes Ausschalten vom Stuhl (mittags und abends)

Stuhl inkl. Schläuche gründlich desinfizieren

Saugschläuche desinfizieren

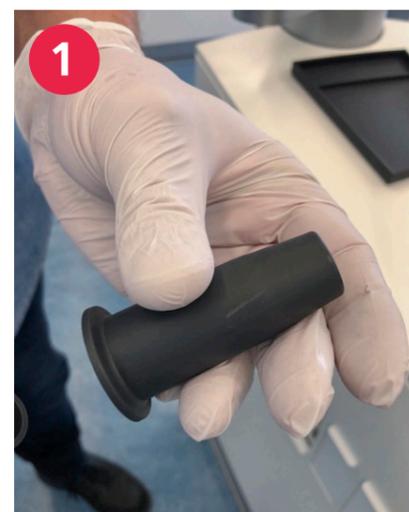

1 Die beiden Kappen der Saugschlauchansätze abnehmen



2 Beide Schläuche aus der Halterung ziehen



3 Den schwarzen Knopf drücken (wegen Sauggeräuschen)



4 Kleine Sugi unten, die grosse Sugi oben einstecken




5 Wieder den schwarzen Knopf drücken



6 Wenn «Suction» steht, werden die Saugschläuche desinfiziert


Stuhl

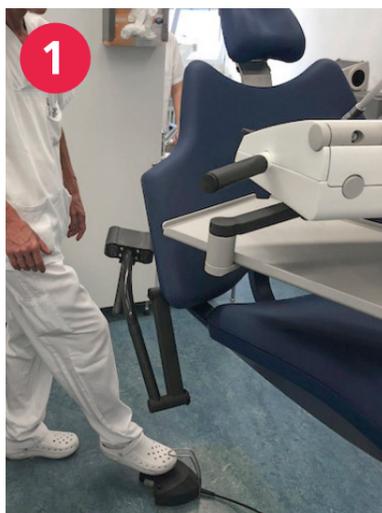

1 Stuhl hochfahren



2 Schläuche hoch

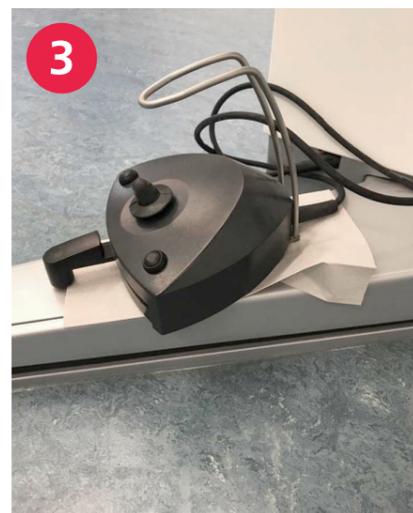

3 Fusspedal inkl. Serviette auf die Konsole




10 Linker Knopf drücken (Spülbecken)



11 Wenn «Unit Switch off» steht, Stuhl ausschalten



12 Bitte **KEINE** Assistenzstühle unter den Behandlungsstuhl

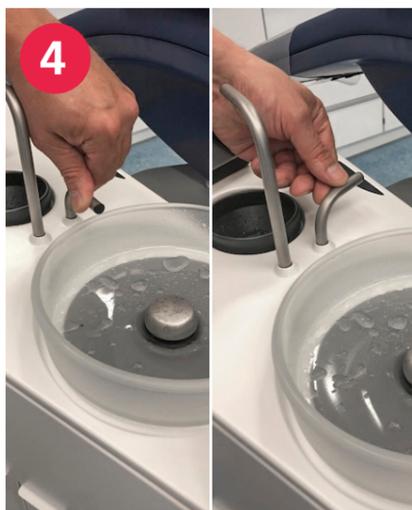

4 Spülwasserhahn nach rechts drehen



5 3-Wegspritze Ansatz entfernen und auf die schwarze Matte legen



6 Spülanlage auf das Spülbecken



7 Spülanlage an Wasser anschließen (bis zum Anschlag andrücken)



8 3-Wegspritze in die Durchsauganlage stecken
→ **ACHTUNG Knopf muss einrasten**



9 Mikromotor parallel zum Unit einstecken

Mikromotor



Tropf vom Silikon auf die untere Hälfte der O-Ringe vom Mikromotoransatz und mit Handschuhen verteilen